



GoldLine
by Condor[®]

CHIRURGIA OGÓLNA: SYSTEM MINI - PROKTOLOGIA

Starannie wykonany i dopasowany, system rozwieraczy chirurgicznych Condor[®] GoldLine zapewnia idealne ustawienie w obszarze zabiegów proktologicznych. Dzięki niemu ani narzędzia, ani system nie stanowią przeszkody, lecz tworzą niczym nieograniczoną przestrzeń pracy.

System Mini do zabiegów proktologicznych jest wynikiem zdobytego w praktyce doświadczenia i najwyższych wymagań, według których pracujemy, i którym staramy się sprostać podczas tworzenia i udoskonalania naszych produktów.

Hak Alan Parks oraz hak Langenbeck o różnej długości umożliwiają dokładne ustawienie na dowolnej głębokości ciała pacjenta.


Używając podwójnych zacisków, najpierw określa się pozycję haka, aby następnie zamocować go w zacisku.

Po ustawieniu rozwieraczy w odpowiednim miejscu, uzyskujemy idealny i stabilny wgląd w operowane miejsce. Wówczas rozwieracze nie są już podatne na swobodne przesunięcie.

Oświetlenie trudno dostępnego obszaru zabiegów proktologicznych zapewnia łatwo regulowany przewód optyczny Condor[®]. Jesteśmy jedynym producentem sprzętu oferującego takiej klasy precyzję i rozwiązania w obszarze proktologii.

Główne zalety zestawu Mini do zabiegów proktologicznych:

- Idealne ustawienie również w głębszych partiach ciała
- Nieograniczona przestrzeń pracy ponad systemem
- Oświetlenie (Przewód optyczny Condor[®])
- Stabilne ustawienie
- Haki o różnej długości

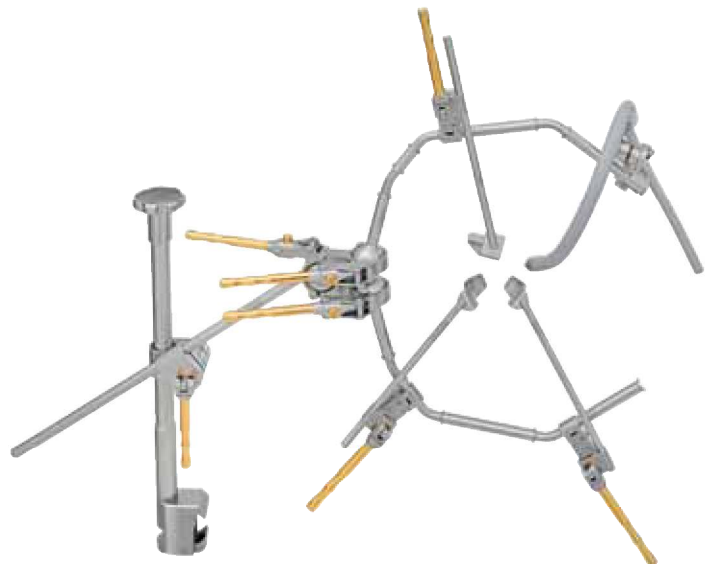

Condor® GoldLine dla chirurgii

Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów chirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”. Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do zabiegów chirurgicznych, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe.

Dostępne są następujące zestawy rozwieraczy chirurgicznych. Istnieje możliwość skomponowania systemu rozwieraczy według własnych potrzeb wykorzystując elementy z poszczególnych systemów:

System Maxi

- > Jama brzuszna
- > Otyłość

System Mini

- > Tarczycza
- > MIVAT
- > **Proktologia**
- > Chirurgia dziecięca

System Rochard

- > Transplantacja
- > Chirurgia nadbrzusza

System Mini do zabiegów proktologicznych oferuje wszystkie zalety i elementy bazowe systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Unikalne przeguby kulowe umożliwiają dokładne ustawienie oraz swobodę ruchów podczas zabiegu. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i nieskomplikowany. Ustawienie 3D wykorzystujące przeguby kulowe pozwala na regulację uchwytów-ramion, aby zapewnić nieograniczającą ruchów przestrzeń pracy. Podwójne zaciski to kolejne wygodne rozwiązanie. Dzięki nim można zamocować rozwieracze umieszczone w miejscu operacji.

Cecha dodatkowa:

Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: System Mini - Proktologia

Produkt	Opis	Ilość
100.060.060 E	Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną	1
100.440.040 K	Poprzecznicza z kulą	1
100.170.080 K	Uchwyt	1
100.050.020 DC	Uniwersalny zacisk Condor® podwójny typu "KLIK" z zamkiem mimośrodowym	4
100.220.040 K	Uchwyt-ramię mini z kulą	2
117.024.075	Hak Alan Parks, obrotowy, 24 mm/75 mm	2
117.024.095	Hak Alan Parks, obrotowy, 24 mm/95 mm	2
115.020.060	Hak Langenbeck, obrotowy, 20 mm/60 mm	2
115.020.080	Hak Langenbeck, obrotowy, 20 mm/80 mm	2
115.020.100	Hak Langenbeck, obrotowy, 20 mm/100 mm	2
180.012.012	Przewód optyczny Condor® z adapterem i uchwytem do łyżek z systemem zębnym	1

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach chirurgii ogólnej. Chętnie wypożyczymy Państwu system rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!

KOPACZMED S.C. 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 10 tel./fax +48 58 762 40 40 tel. kom. +48 602 714 565
biuro@kopaczmed.com / www.kopaczmed.com

BEZPOŚREDNI I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ PRODUKTÓW NIEMIECKIEJ FIRMY CONDOR GmbH