

# Instrukcja Montażu Tarczyca (1/3)



- Główny Uchwyt musi być zamontowany na istniejącej szynie stołu lub na stole ze sterylną osłoną.
- Proszę zwrócić uwagę czy zacisk głównego uchwytu jest całkowicie otwarty (poprzez leworęczny obrót pokrętła ręcznego)
- Po zamontowaniu głównego uchwytu zapnij zacisk poprzez praworęczny obrót górnego pokrętła ręcznego.

**Sprawdź czy główny uchwyt jest bezpiecznie połączony!**



- Otwórz zamknięcie mimośrodowe przy głównym uchwycie i wstaw ramę uchwytu w szczękę zaciskowej.
- Ustaw ramę w ten sposób, aby pomiędzy układem, a pacjentem pozostała odpowiednia ilość miejsca.
- Ustaw kulę ramy ponad nosem, a następnie dopasuj.
- Przymocuj ramę poprzez użycie dźwigni zaciskowej na głównym uchwycie.



- Jednocześnie odblokuj dźwignię poprzez użycie jej złotego przycisku i otwórz dźwignię zaciskową. Uchwyt może zostać teraz ustawiony na kuli ramy. Zamknij Dźwignię zaciskową, aby przymocować uchwyt.
- Aby usunąć uchwyt z ramy, dźwignia zaciskowa musi być zamknięta. Jedynie w tej pozycji możliwe jest odblokowanie urządzenia złotym przyciskiem przy równoczesnym otwarciu dźwigni zaciskowych.

# Instrukcja Montażu Tarczyca (2/3)



- Aby zamontować małe ramiona uchwytu z kulą, proszę odblokować uchwyt oraz otworzyć dźwignię po odpowiedniej stronie.
- Ramiona uchwytu mogą być ustawione osobno w zależności od miejsca operacji.
- Aby osiągnąć idealną pozycję, otwórz dźwignię zaciskową po odpowiedniej stronie, dostosuj ramię uchwytu i na końcu zamknij dźwignię zaciskową w celu przytwierdzenia.



Widok boczny:

- Kule ramy oraz małe ramiona uchwytu powinny formować linię na końcu podbródka.

**Nie stosować ramion uchwytu na ciele!**



- Otwórz zamknięcie mimośrodowe zacisku. Teraz możesz odczytać napis OPEN.
- Aby tylko przymocować zacisk do ramienia zacisku, użyj palca wskazującego i kciuka, żeby utrzymać rozwarły zacisk w dolnej części.
- Po ustawieniu rozwieracza, zacisk musi zostać zamknięty przy pomocy zamknięcia mimośrodowego.

## Instrukcja Montażu Tarczyca (3/3): Montaż uchwytu przy Operacjach w pozycji siedzącej



- Jeżeli Operacja ma zostać przeprowadzona w **pozycji siedzącej**, główny uchwyt musi zostać zamontowany na dodatkowym uchwycie z osłoną sterylną.
- Uchwyt dodatkowy musi być umocowany niesterylnym tłokiem radialnym na ograniczniku głowy lub na stole.